

eFOLDi Användarmanual

Modell: Lifter

Suntech UK Ltd

Innehåll

3	Välkommen
4	Villkor
7	Produktöversikt
8	Komponenter
10	Säkerhetsanvisningar
15	Installation av din eFOLDi Lifter
32	Tekniska specifikationer
33	Bilaga

Välkommen

Tack för att du valde en eFOLDi-produkt som din mobilitetslösning.

Jag heter Sumi Wang, grundare av SunTech UK, och jag vill hälsa dig välkommen till eFOLDi-familjen av användare.

SunTech UK tillverkar ett sortiment av assisterande teknik som hjälper dig att få ut det mesta av livet. Vårt uppdrag är att ge våra kunder frihet, gemenskap och glädje genom ett sortiment av lättanvända, bekväma och marknadsledande mobilitetslösningar.

Din eFOLDi har tillverkats enligt högsta standard och ger dig en produkt som kommer att erbjuda många års frihet och glädje, med pålitlig service i botten.

Ta dig tid att läsa användarmanualen och medföljande dokument innan du använder din eFOLDi-produkt för första gången. Detta hjälper dig att förstå produkten och ger dig maximal glädje och säkerhet av din nya eFOLDi-produkt.

Du kommer snabbt att bli bekant med funktionerna efter lite övning.

SunTech UK är stolta över sina högkvalitativa produkter och sin kundsupport, så kom ihåg att registrera din/dina produkt(er) på: <https://efoldi.com/register-warranty>. Detta hjälper oss att bistå dig om du skulle stöta på problem i framtiden. Jag är säker på att du kommer att uppleva din eFOLDi-produkt som en pålitlig vän och följeslagare, och jag tackar dig för ditt förtroende för våra produkter.

Med vänliga hälsningar,

Sumi Wang

Villkor och friskrivningar

Termerna "vi", "oss", "vår", "SunTech UK" och "SunTech UK Ltd" avser SunTech UK Limited, ett brittiskt registrerat bolag, begränsat genom garanti, registrerat hos Companies House, nummer 06906908. Termen "webbplats" avser webbplatsen som finns på www.efoldi.com. Termerna "du", "din", "användare" och "förare" avser den person som använder eFOLDi, oavsett om annan person hanterar eFOLDi för användarens räkning, inklusive allmän hantering, underhåll, reparationer med mera.

Köparens avtal

Genom att ta emot leverans av denna eFOLDi åtar du dig att inte ändra, justera eller modifiera denna eFOLDi och/eller någon del som medföljer den eller senare tillhandahålls för den, och/eller göra obrukbara eller osäkra skydd, skärmar eller andra säkerhetsfunktioner hos denna produkt; att inte underlåta, vägra eller försumma att installera eventuella eftermonteringssatser som från tid till annan tillhandahålls av SunTech UK Ltd för att förbättra och/eller bevara säker användning av denna produkt. Du samtycker även till att acceptera och följa villkoren häri, som kan komma att revideras från tid till annan och uppdateras på vår webbplats, vilket gäller med omedelbar verkan.

Genom att använda eFOLDi och/eller tillbehör och/eller komponenter som medföljer eller är avsedda för eFOLDi bekräftar användaren att ha läst och förstått produktens/produkternas användning och begränsningar utan undantag. Detta ska inte utgöra ett avstående från eventuella underförstådda garantier som kunden behåller enligt lag.

Garantier blir ogiltiga och SunTech UK Ltd påtar sig inget ansvar, på vilket sätt det än må vara, vid felaktig användning och/eller missbruk av produkterna, helt eller delvis, av användaren och/eller obehöriga personer, vilket bland annat kan inkludera: användarens underlåtenhet att följa alla lagkrav och riktlinjer, oavsett var och hur produkten används eller är avsedd att användas, bristande eller olämpligt underhåll, underhåll (förutom det rutinunderhåll som beskrivs i denna manual av användaren) utfört av någon som inte är godkänd att göra detta, icke godkända reparationer, obehörig isärtagning av fordonet och/eller komponenter inklusive (men inte begränsat till) batteripaket och styrenheter, icke godkända modifieringar eller ändringar, underlåtenhet att säkerställa att korrekta ihop- och utfällningsprocedurer följs noggrant och fullt ut, skada eller skada oavsett orsak, underlåtenhet att tillämpa alla rimliga och lämpliga säkerhetsåtgärder vid alla tidpunkter, felaktig användning av fordonet och/eller delar och/eller tillbehör, användning av fler än en person samtidigt, användning inom någon form av tävlingssport, racing, stunts, hoppning eller liknande aktivitet.

Vårt och våra leverantörers ansvar gentemot dig och/eller tredje part under alla omständigheter är begränsat till användarens kostnad för köpta, kvalificerade produkter. Kvalificerade produkter som godkänns för retur, enligt returpolicyn som anges på webbplatsen www.efoldi.com/return-policy.

Informationen i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. För de senaste uppdateringarna och information, besök vår webbplats på www.efoldi.com.

eFOLDi Lifter bör INTE användas av:

Personer som inte kan:

- Lyfta och placera den säkert*.
- Hantera balanseringen av den scooter som lyfts.
- Använda alla reglage fullt ut och som avsett.

- Bibehålla lämplig medvetenhet om alla relevanta omständigheter och vidta lämpliga åtgärder som kan krävas för att undvika skada.
- Lyfta helt eller delvis enligt vad som kan krävas, beroende på användarens behov*.

*Om inte personen åtföljs av någon som är tillräckligt kapabel och kompetent att utföra uppgiften.

Frakt och leverans

Kontrollera mot din orderbekräftelse eller faktura för att säkerställa att leveransen är komplett, eftersom vissa komponenter kan vara individuellt förpackade. Om du inte tar emot en komplett leverans, kontakta oss omedelbart. Om skada har uppstått under transport, antingen på förpackningen eller innehållet, kontakta det ansvariga transportföretaget.

Produktöversikt

Indikationer för användning

eFOLDi Lifter är konstruerad för att enkelt höja och sänka en scooter till höjden av ett genomsnittligt bagageutrymme i en bil, vilket gör det möjligt för användare som inte själva klarar av att lyfta någon av våra lätta scootrar mer än 12 cm från marken.

eFOLDi Lifter är utformad för användning med våra eFOLDi-scootrar, men kan även användas med många andra scootrar som ligger inom eFOLDi Lifterns viktgräns på 40 kg.

eFOLDi Lifter väger endast 5,2 kg och drivs med batteripaketet från antingen eFOLDi Lite, eFOLDi Compass eller eFOLDi Explorer (MK1.5). Den ger användarna en effektiv och enkel lösning för att lyfta sin scooter utan att kräva någon modifiering av vare sig fordonet eller scootern.

Avsedd användning

eFOLDi Lifter är avsedd att göra det möjligt för en person med begränsad lyftförmåga att på ett säkert sätt lasta en mobilitetsscooter i sitt fordon.

Komponenter

1	eFOLDi Lifter (huvudenhet)
2	eFOLDi Lifterns elektriska kontakter (del av huvudenheten)
3	Fjärrkontrollsenhet
4	Strömkabel för anslutning till batteriet

Obs: Kablarna levereras normalt redan anslutna till huvudenheten (Lifter).

Ytterligare tillbehör

Grå filt

eFOLDi Lifter är konstruerad för att enkelt rullas in i och ut ur ett fordon.

För att säkerställa att fordonets yttre kaross inte skadas eller repas vid användning har eFOLDi tillhandahållit en filt för att minimera denna risk.

Vilken enkel filt som helst kan användas om din eFOLDi-filt inte finns tillgänglig, men Lifter bör inte användas för att flytta en scooter in i eller ut ur ett fordon utan att använda antingen eFOLDi-filten eller motsvarande.

eFOLDi tar inget ansvar för skador på något fordon där Lifter inte har använts i enlighet med vägledningen och instruktionerna i denna manual.

När en filt används, se till att filten hålls borta från fordonets bagagelucks-lås så att den inte fastnar eller kläms av fordonets låsmekanism.

HÅLL FILTEN BORTA FRÅN ELD

Säkerhetsanvisningar

Använd inte din Lifter för första gången utan att först läsa och förstå hela användarmanualen.

Säkerhetsinstruktioner

- Använd aldrig eFOLDi Lifter när du är påverkad av alkohol.
- Se till att ytan är jämn och fri från hinder när du ställer upp eFOLDi Lifter.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från mekanismen när den används.
- Tillåt inte att oövakade barn leker i närheten av utrustningen när den används.
- Håll husdjur och andra djur borta från eFOLDi Lifter när den är i drift.
- Använd inte eFOLDi Lifter för något annat syfte än att lyfta en scooter som ligger inom Lifterns lastgräns (maximal belastning 40 kg).
- Stäng alltid av och koppla bort eFOLDi Lifter från batteriet när den inte används.
- Använd inte eFOLDi Lifter under extrema väderförhållanden.

Varning

- Det är användarens ansvar att läsa manualen och medföljande dokument innan eFOLDi används samt att följa alla rekommendationer som finns i den, för att fullt ut följa alla lokala lagar i sina länder och områden, och att använda eFOLDi med vederbörlig omsorg.
- eFOLDi Lifter är enkel att använda, men dess fällmekanism kan orsaka allvarlig skada om den används felaktigt och hanteras utan vederbörlig omsorg. För att undvika risk för skada, se till att händer, fingrar, smycken, kläder och andra föremål inte kommer i kontakt med fällmekanismen eller rörliga delar på eFOLDi Lifter, och studera manualen noggrant innan du börjar använda den.
- Det rekommenderas att användaren bekantar sig med reglagen och hanteringen av produkten på en säker plats utan hinder.
- Ladda batteriet/batterierna helt före första användning och följ riktlinjerna i denna manual och på etiketten på batteriets undersida för att förlänga din scooterbatteris livslängd.
- För att förhindra skada på dig själv eller andra, se alltid till att strömmen är avstängd när produkten inte används.
- Det finns vissa situationer, inklusive vissa medicinska tillstånd, där användaren behöver öva på att använda produkten i närvaro av en utbildad assistent. En utbildad assistent kan definieras som en familjemedlem eller vårdpersonal som är särskilt utbildad i att hjälpa en scooteranvändare med olika dagliga aktiviteter.
- Använd inte produkten i en lutning eller vinkel, och se till att scootern är stabil på Lifterns plattform innan Lifter höjs eller sänks.
- Användning i regn, snö, salt, dimma samt på isiga eller hala ytor kan ha negativ inverkan på det elektriska systemet.
- Var uppmärksam på att motorn kan vara het efter användning. Rör inte vid eller kom åt motorn direkt förrän den har svalnat.
- Sitt aldrig på din scooter när den används tillsammans med någon typ av lyft eller hiss. Din scooter är inte konstruerad för sådan användning, och eventuell skada som uppstår av sådan användning är inte SunTech UK Ltds ansvar.

- Din eFOLDi Lifter är INTE en leksak och rekommenderas inte för personer under 14 år. Låt inte barn leka med den. Den interna fällmekanismen kan orsaka skador på händer.
- Rådfråga din läkare om du tar receptbelagd medicin eller har vissa fysiska begränsningar. Vissa mediciner och begränsningar kan försämra din förmåga att använda eFOLDi Lifter säkert. Rådfråga din läkare om du tar någon medicin som kan påverka din förmåga att använda produkten säkert.

Modifiering

Din Lifter har konstruerats för att vara så praktisk som möjligt. Under inga omständigheter ska du modifiera, lägga till, ta bort eller inaktivera någon del eller funktion på din Lifter. Detta ogiltigförklarar din garanti.

- Modifiera inte din eFOLDi Lifter på något sätt som inte är godkänt av eFOLDi.
- Använd inte tillbehör som inte har testats eller godkänts för eFOLDi-produkter.

Vikt- och storleksbegränsning

Överskrid inte den viktkapacitet som anges i avsnittet Tekniska specifikationer. Att överskrida viktkapaciteten gör garantin ogiltig. eFOLDi ansvarar inte för skador på person eller egendom till följd av att viktbegränsningarna inte följts.

Om du använder eFOLDi Lifter för något annat än eFOLDi-scootrar måste du kontrollera att föremålet får plats säkert på Lifter, att inget sticker ut, och att föremålet är balanserat och stabilt på Lifter innan Lifter används med andra typer av scootrar.

Transportera inte passagerare på eFOLDi Lifter. Att transportera passagerare på din eFOLDi Lifter kan leda till skada. eFOLDi Lifter är specifikt konstruerad för lätta scootrar, inte för personer.

Temperatur

Vissa delar av Lifter är känsliga för temperaturförändringar. Styrenheten kan endast användas i temperaturer mellan -15 °C och 40 °C (-5 °F till 104 °F).

Säkerhetskontroll

- Kontrollera alla elektriska anslutningar. Se till att de är säkra och inte korroderade.
- Kontrollera regelbundet om det finns lösa fästeanordningar, fästen och andra komponenter.

Vid uppställning av din eFOLDi Lifter...

- Skynda dig inte när du ställer upp din eFOLDi Lifter.
- Se till att eFOLDi Lifter är placerad på ett jämnt golv eller en jämn yta.
- Se till att alla kontakter är ordentligt säkrade.
- Se till att scootern är säkert lastad och korrekt balanserad.

Studera instruktionerna noggrant för att bekanta dig med fäll-proceduren, och använd endast en rörlig del i taget.

Installation av din eFOLDi Lifter

Din eFOLDi Lifter bör levereras med kablarna redan anslutna. Om detta inte är fallet kan kablarna enkelt anslutas enligt följande guide.

- Lokalisera fjärrkontrollsenheten.
- Lokalisera anslutningskabeln på sidan av eFOLDi Lifter.
- Anslut fjärrkontrollens kontakt till eFOLDi Lifterns motsvarande kontakt. Observera kontakternas orientering.
- Stäng låsspärren för att säkra kontakten.
- Lokalisera batterianslutningskabeln.
- Anslut batterikabeln till eFOLDi Lifterns kontakt. Observera kontakternas orientering.
- Stäng låsspärren för att säkra kontakten.

Om du vill koppla bort kablarna för transport eller förvaring

- Lyft låsspärren.
- Dra isär kontakten.

Användning av eFOLDi Lifter – Säkerheten först

När du använder din eFOLDi Lifter, se alltid till att lyftenheten står på jämnt underlag och att scootern är väl balanserad.

Lifterns plattform jämn och scootern centrerad för balans — korrekt.

Lifterns plattform i en vinkel större än 3° och scootern obalanserad — felaktigt.

PÅMINNELSE!

Tillåt inte att oövakade barn leker i närheten av utrustningen när den används.

Håll husdjur och andra djur borta från eFOLDi Lifter när den är i drift.

Lastning av din scooter...

- Placera den medföljande filten i fordonets lastutrymme. Håll filten borta från fordonets bagagelucks-lås. Låt inte filten fastna eller klämmas av fordonets låsmekanism.
- Vik filten så att en del av den kan vikas ut över lastutrymmets kant.
- Placera Lifter-enheten på marken med den långa kanten vänd mot fordonets lastutrymme. Marken måste vara jämn och tillräckligt stabil för att bära Lifterns och scooterns vikt.
- **MYCKET VIKTIGT!** Lifter-enheten bör placeras ungefär 2,5 cm (1 tum) från fordonets bakre kant.
- Ta bort batteriet från din scooter. Anslut batterikabelns kontakt till batteriet (Lite/Compass-batteri visas).
- Lifter är nu redo att lasta din scooter.
- Rulla scootern nära Lifter. Kom ihåg att ta bort batteriet. Observera att scooterns säte/ryggstöd ska vara vänt mot fordonets lastutrymme.
- Lyft scootern upp på Lifterns plattform, som är 12 cm hög.
- Se till att scootern är centrerad på Lifterns plattform och balanserad.
- Placera foten på Lifterns bakre tvärbalk. Du kan behöva höja plattformen något för att göra detta.
- Använd fjärrkontrollen för att höja Lifter. Under lyftet, var noga med att upprätthålla säkerheten hela tiden. Tillåt inte husdjur eller små barn i närheten av Lifter, och se till att scootern förblir säkert balanserad.
- Lifterns plattform behöver vara ungefär i nivå med kanten på fordonets lastutrymme.
- Vik ut en del av filten för att skydda fordonets kaross och lack.
- Medan du upprätthåller nedåtriktat tryck med foten på Lifterns nedre tvärbalk, sänk scootern till en plan position och rulla scootern över glipan mellan Lifter och fordonet.
- Skjut scootern över kanten på fordonets lastutrymme.
- Placera scootern efter behov i fordonets lastutrymme.
- Vik in filten bakom scootern INNAN du sänker Lifter. Håll filten borta från fordonets bagagelucks-lås. Låt inte filten fastna eller klämmas av fordonets låsmekanism.
- Sänk Lifter med hjälp av fjärrkontrollen.
- Koppla bort batteriet från Lifter.
- Packa batteriet och Lifter-enheten säkert i ditt fordon.

Lossning av din scooter...

- Ta ut Lifter med dess kablar och batteri ur ditt fordon.
- Placera Lifter-enheten på marken med dess långa kant vänd mot fordonets lastutrymme.
- MYCKET VIKTIGT! Lifter-enheten bör placeras ungefär 2,5 cm (1 tum) från fordonets bakre kant.
- Anslut batterikontakten till batteriet (Lite/Compass-batteri visas).
- Lifter är nu redo att lossa din scooter.
- Använd fjärrkontrollen för att höja Lifterns plattform.
- Var uppmärksam på eventuella hinder när du höjer Lifterns plattform.
- Lifterns plattform behöver vara ungefär i nivå med kanten på fordonets lastutrymme.
- Vik ut en del av filten för att skydda fordonets kaross, och manövrera scootern så att du kan greppa dess bärhandtag.
- Placera foten på Lifterns bakre tvärbalk.
- Medan du upprätthåller nedåtriktat tryck med foten på Lifterns nedre tvärbalk, dra scootern över kanten på fordonets lastutrymme och upp på Lifterns plattform.
- Ställ scootern upprätt och se till att den är centrerad och säkert balanserad.
- Vik tillbaka filten in i fordonet INNAN du sänker Lifter-enheten. Håll filten borta från fordonets bagagelucks-lås. Låt inte filten fastna eller klämmas av fordonets låsmekanism.
- Använd fjärrkontrollen för att sänka Lifterns plattform. Ta bort foten från tvärbalken innan sänkning.
- Under sänkningen, var noga med att upprätthålla säkerheten hela tiden. Tillåt inte husdjur eller små barn i närheten av Lifter, och se till att scootern förblir säkert balanserad.
- När Lifterns plattform är sänkt till sin lägsta nivå på 12 cm från golvet, lyft helt enkelt scootern av plattformen.
- Koppla bort batteriet och sätt tillbaka det i scootern om det behövs, och packa ihop Lifter.

Tekniska specifikationer

<i>Ramens material</i>	Magnesium AZ61 Perforerad aluminiumplåt (1100-serien)
<i>Ytbehandling</i>	Pulverlackering/silver/TPH-laminerad
<i>Hopfälld storlek (endast Lifter-enhet) L/B/H</i>	64 cm x 40 cm x 12 cm 25,19" x 15,74" x 4,72"
<i>Uppfälld storlek (endast Lifter-enhet) L/B/H</i>	64 cm x 40 cm x 76 cm 25,19" x 15,74" x 26,92"
<i>Vikt (endast Lifter-enhet)</i>	5,2 kg / 4,64 lbs
<i>Maximal lyftkapacitet</i>	40 kg / 88,18 lbs
<i>Filtspecifikationer</i>	100 % polyester 150 cm x 150 cm / 59,05" x 59,05" HÅLL BORTA FRÅN ELD
<i>Motor</i>	29 VDC, 1,8 A linjärt ställdon
<i>Strömförsörjning</i>	29 VDC batteripaket med XLR-honkontakter (t.ex. eFOLDi Lite / eFOLDi Explorer (MK1.5) batteripaket)
<i>Användning</i>	Endast för användning på plant och stabilt underlag

Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Bilaga

Levereras av:

Suntech UK Ltd

25 Ormside Way, Holmethorpe Industrial Estate, Redhill, Surrey RH1 2LW

+44 (0) 203 143 5168

CE	Europeisk CE-märkning	Tillverkare-symbol	Tillverkare
Tillverkningsdatum-symbol	Tillverkningsdatum	Bok-symbol	Se bruksanvisningen
Soptunna-symbol (överstruken)	Får ej slängas i hushållsavfall	UKCA	UK Conformity Assessed